


## 2 | SUPPLEMENTEN EN TESTSCHOENEN

Wanneer uw leesten en supplementen klaar zijn, biedt CYS u de mogelijkheid voor een testsessie. Met behulp van een folie-testschoen in combinatie met supplementen kunt u zien of er drukpunten zijn, op basis waarvan u kunt besluiten om de leesten aan te passen. De testfase kan een handige optie zijn voordat u de complete schoenen bestelt.

Als u een langere testfase wilt met uw klant, kunt u er ook voor kiezen om de schoenen te passen met leren testschoenen. We hebben ook leren testschoenen voor eenmalig gebruik. Als u de speciale orthopedische testschoenen met verstevigingsvoorziening wilt uitproberen en hergebruiken in de uiteindelijke schoenen, kunt u ook voeringsschoenen voor de testfase bestellen.

Als u supplementen hebt besteld, zullen we die verwerken in elk type schoen. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de typen supplementen die we aanbieden.

## OPTIONELE TESTFASE

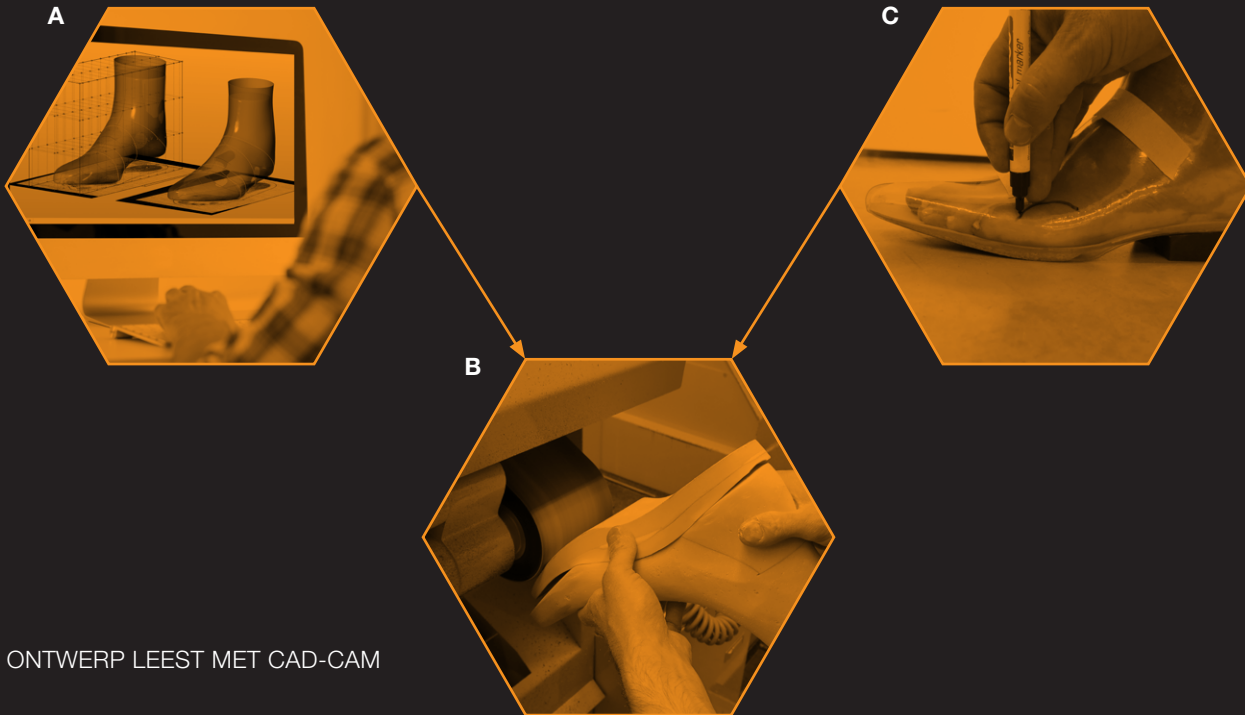

**A** | ONTWERP LEEST MET CAD-CAM

**B** | PRODUCTIE VAN SUPPLEMENTEN

**C** | AANPASSING VAN FOLIE TESTSCHOEN  
Optioneel

## 2.1 | SUPPLEMENTEN

We hebben vier categorieën supplementen. Binnen deze categorieën zijn allerlei variaties mogelijk. De materialen die worden gebruikt voor elke laag worden gespecificeerd in de tekeningen.

SUPPLEMENTEN	ARTIKELNUMMERS VOOR UW BESTELLING
Standaardsupplementen	10 tot en met 15
Supplementen met voorziening	20 tot en met 27
Orthese supplement met amputatiesteun	40 tot en met 42
Orthese supplement met teen amputatiesteun	50 tot en met 54

Houd er rekening mee dat we een extra bedrag berekenen bovenop de standaardkosten voor supplementen voor het volgende:

- Supplementen en/of voeringsschoenen gemaakt met 1 of 2 lagen van deze materialen: 5016 - 5017 - 5018
- Tongvullingen en/of voeringsschoenen voor "Pes Equines", "Klompvoet" of "Pes Equinovarus"
- Tekenontwerpen voor verschillende complexe voet amputaties.

CYS maakt een werksupplement voor productie, indien u 5018 als toplaag bestelt (meerprijs). Het werksupplement vervangt u door het definitieve supplement, beide worden u toegestuurd. U kunt het werksupplement gebruiken voor toekomstige bestellingen.

### 10 - 15 STANDAARDSUPPLEMENTEN

	10 Standaard	11 Semi diabetisch	12 Diabetisch	13 Diabetisch Plus	14 Werkschoenen	15 Badschoenen
<b>Lagen</b>						
1e	5040	5027	5032	5027	5006	5039
2e	5049	5040	5040	5018	5008 / 5039	
3e	5039		5039	5039		

## 20 - 27 SUPPLEMENTEN MET VOORZIENING

Lagen	1e	2e	3e
	5040	5048	5039
	5040	5048	5039
	5040	5048	5039
	5040	5048	5039

Lage verstijving	Hoge verstijving
<p>20</p>	<p>24</p>
<p>21</p>	<p>25</p>
<p>22</p>	<p>26</p>
<p>23</p>	<p>27</p>

## 40 - 42 ORTHESE SUPPLEMENT MET AMPUTATIESTEUN

	40 Vulling bij deel van voorvoet	41 Teenvulling	42 Vulling bij hak
Lagen	1e 2e	1e 2e	1e 2e
	5040	5040	5040 5048

## 50 - 54 PROTHESE SUPPLEMENT MET VERSCHILLENDE VOET AMPUTATIES

**50 Deel van teen  
Amputatiesteun**

**51 Metatarsaal  
Amputatiesteun**



**52 Transmetatarsaal  
Amputatiesteun**

**53 Lisfranc  
Amputatiesteun**


**54 Chopart  
Amputatiesteun**

Lagen

1e Tongpolstering / bal / circulair  
2e 5050  
3e 5048  
4e Koolstof  
5e 5039  
6e 5027

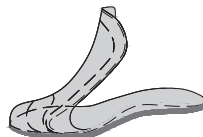
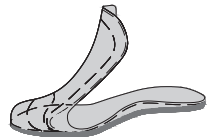


### AMPUTATIELIJNEN

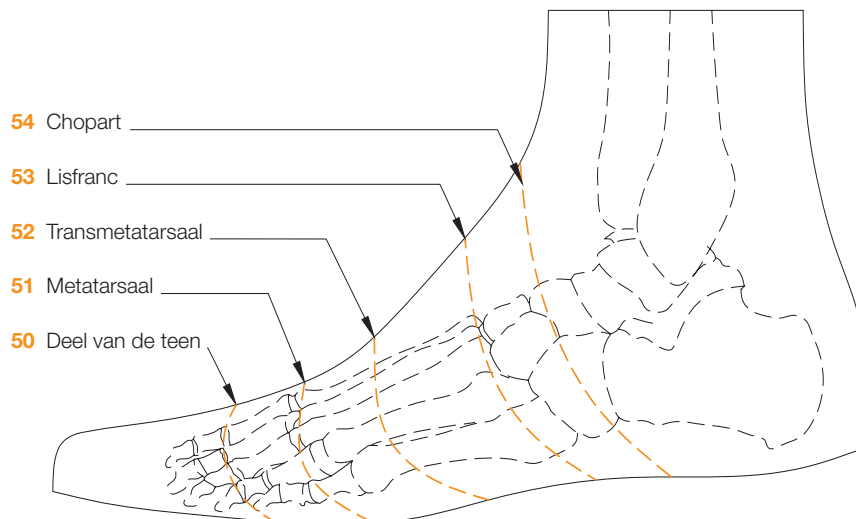

## 2.2 | AFWIKKELINGSTYPEN

### BASISSUPPLEMENT

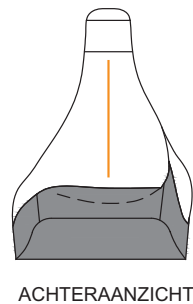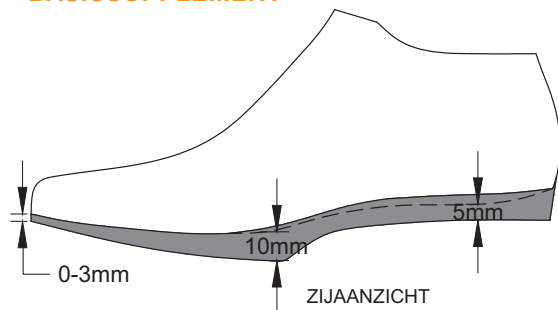


### ARTIKELNUMMERS VOOR UW BESTELLING


### AFWIKKELINGEN

60	Normale afwijking
61	Vervroegde afwijking
62	Twee fasenafwijking
63	Vertraagde afwijking
64	Polyfasische afwijking
65	Afwijking naar mediaal
66	Afwijking naar lateraal


### 60 NORMALE AFWIKKELING

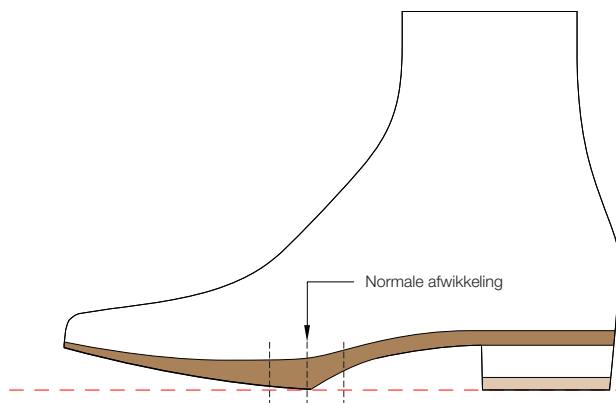


### 61 VERVROEGDE AFWIKKELING

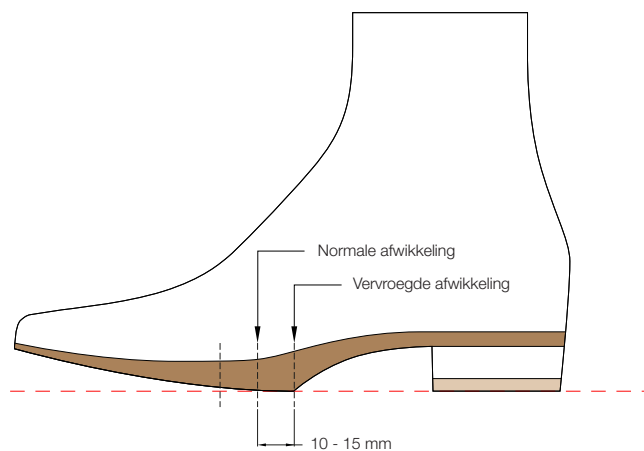


### 62 TWEE FASEN AFWIKKELING

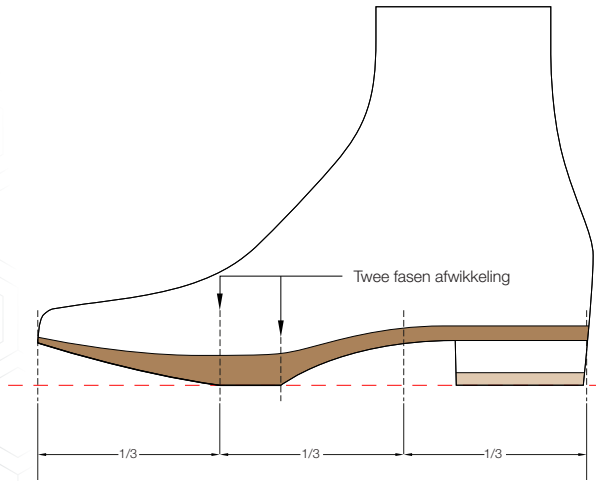


### 63 VERTRAAGDE AFWIKKELING

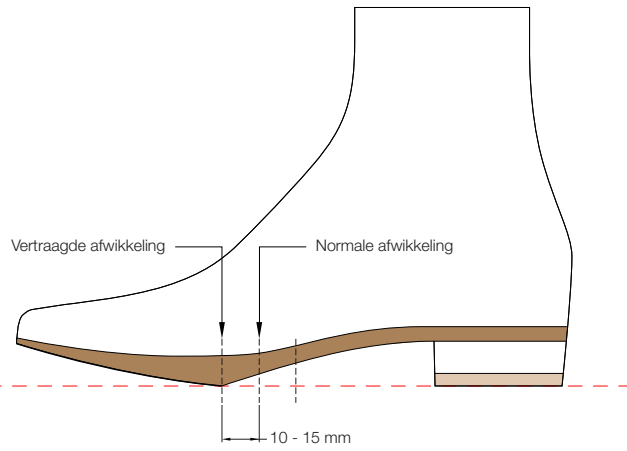


### 64 POLYFASISCHE AFWIKKELING

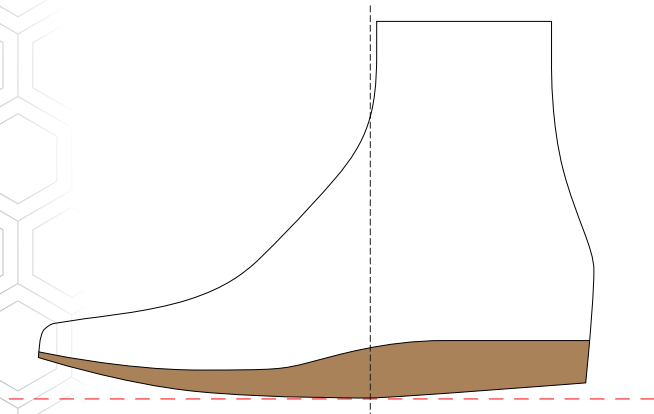

### 65 AFWIKKELING NAAR MEDIAAL

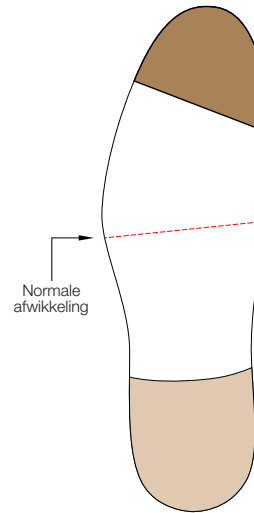


### 66 AFWIKKELING NAAR LATERAAL

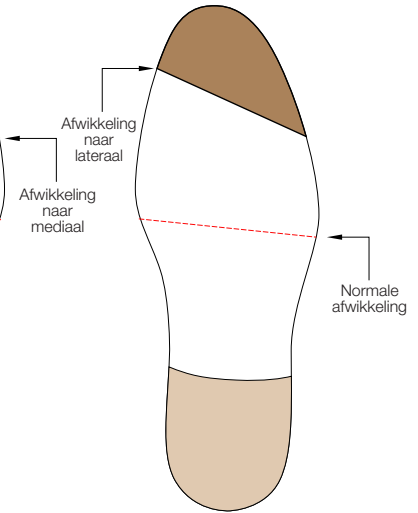

## 2.3 | FOLIE- EN TESTSCHOENEN

Als u wilt dat we de leesten aanpassen vanwege drukpunten, markeer deze drukpunten dan op de folie testschoenen. Stuur de folie testschoenen inclusief uw markeringen naar onze productie zodat we de aanpassingen aan de leest kunnen aanbrengen. U kunt de leesten echter ook zelf aanpassen. Voor meer informatie verwijzen we naar de bestelprocedure voor testschoenen. Wij prefereren voor "er bij +" een groene stifft te gebruiken en voor "er af -" een rode stifft te gebruiken.

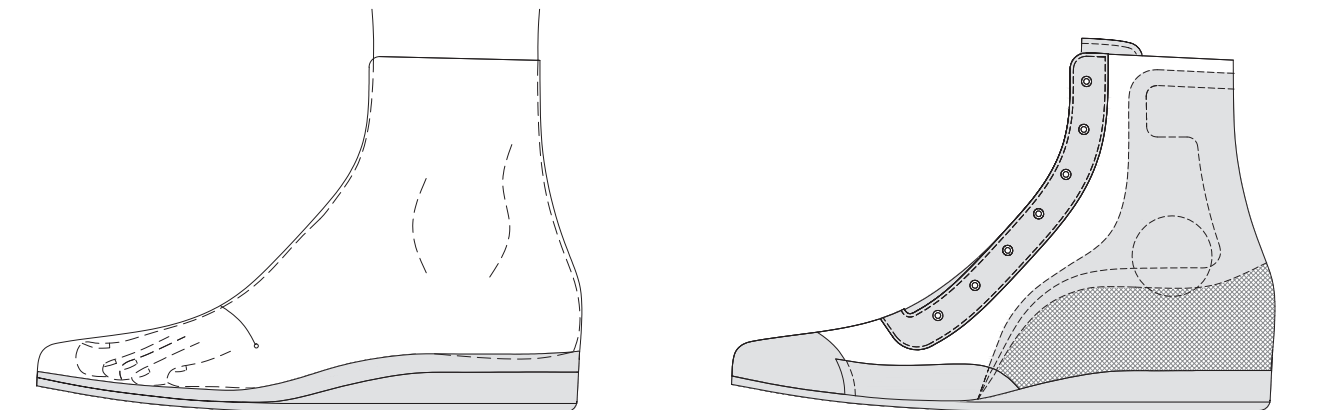


Andere opties voor testschoenen zijn leren testschoenen of voeringsschoenen. Leren testschoenen worden niet hergebruikt in het productieproces van de uiteindelijke schoenen. Om deze procedure zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen, gebruiken we leerafval voor deze testschoenen. Hierdoor kan het voorkomen dat het leer niet altijd dezelfde kleur heeft. In deze gevallen spuiten we de buitenkant van de ledertestschoenen zwart. Een leren testschoen geeft de cliënt de mogelijkheid om de koker of het schoenconcept te testen. De cliënt kan deze leren testschoen 2-3 weken dragen. Voeringsschoenen kunnen ook worden besteld om zowel de vorm als de speciale orthopedische kenmerken en voorzieningen te passen en te testen. Voeringsschoenen met voorzieningen worden hergebruikt in het productieproces en worden onderdeel van de uiteindelijke schoenen.

TESTSCHOEN	MATERIAAL	CODE
Plastic harde testschoen	PVC-FOLIE	5002
Plastic zachte testschoen	ERCOFLEX	5001
Voeringsschoen voor testfase	Leren kalfsvoering	
Leren testschoen	Leerafval	



Als we een nieuwe leest, supplement en proefschoenvan PVC folie maken, kan er ook gekozen worden om direct de TVO te maken. Het voordeel is dat de maatnemer de patiënt kan laten passen inclusief TVO-voorziening.

Referentie:

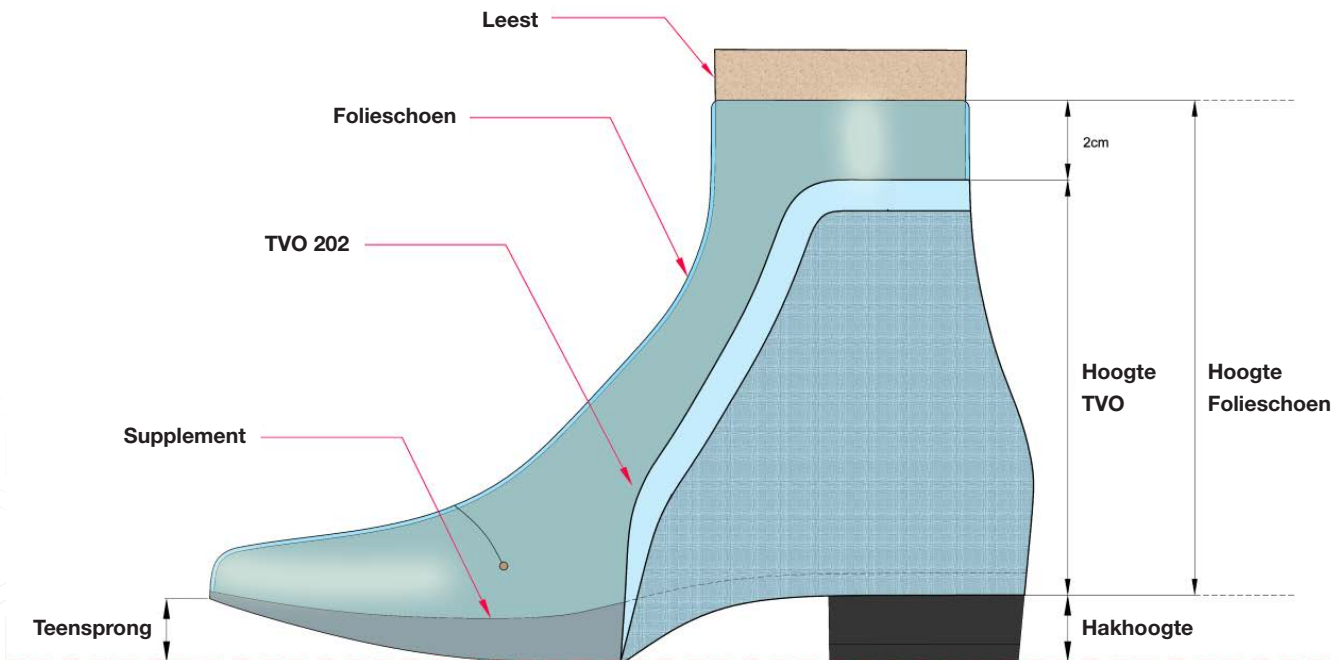

**Belangrijk:** bij het retourneren van het paar voor het maken van complete schoenen, altijd de pas-TVO meesturen met de leesten.